

NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah balenia



1. Jednorazové špachtle (5 ks)
2. Figúrka chameleóna
3. Kamera s LED svetlom
4. Adaptéry k telefónu
5. Návod na použitie

Prehľad kamery Chameleón

JÁTÉKOS KAMÉLEON FIGURA


A kamera és a spatula
kényelmes kezeléséhez

LED VILÁGÍTÁS

A kiváló minőségű felvételek
készítéséhez

NAGYFELBONTÁSÚ KAMERA

CSERÉLHETŐ SPATULA

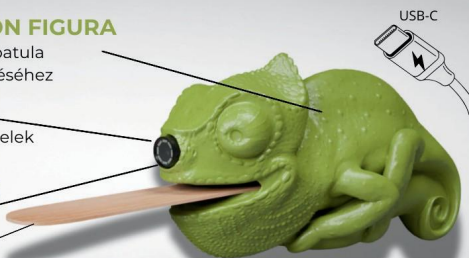

Návod na použitie



Kamera Chameleón sa používa jednoducho, ľahko sa naučí a je bezpečná. Nižšie sme zhrnuli technické kroky aj postup vyšetrenia hrdla. Veríme, že Chameleon bude vašej rodine opakovane účinnou pomocou!

Ak chcete používať kameru Chameleón, naskenujte smartfónom nižšie uvedený QR kód alebo vyhľadajte v App Store či Google Play aplikáciu „Usee Plus“ a stiahnite si ju. Na niektorých telefónoch kamera Chameleon funguje cez aplikáciu „iSee Pro“.

Usee Plus



iSee Pro



Používanie aplikácií:

1

Stiahnutie aplikácie

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „Usee Plus“/„iSee Pro“ z obchodu s aplikáciami pre operačný systém vášho telefónu! (iOS: App Store, Android: Google Play)

2

Pripojenie

Spustíte nainštalovanú aplikáciu a potom pripojte kameru Kaméleon k telefónu pomocou USB kábla!

3

Výber režimu

Na obrazovke, ktorá sa zobrazí po pripojení kamery, si môžete vybrať medzi režimom fotografie a videa!

4

Ukladanie záznamov

Fotografie sa ukladajú v aplikácii aj v galérii fotografií vášho telefónu!

5

Zdieľanie záznamov

Záznam môžete poslať lekárovi priamo z aplikácie!

Videozáznamy sú ideálne na lekárske posúdenie. Ak je to technicky možné, určite pošlite videozáznam!

Postup vyšetrenia hrdla

1

Vloženie špachtle

Ak chcete vykonať test, vložte do úst Chamäleona „jazyk“ – teda špachtľu. **DÔLEŽITÉ!** Nevkladajte si Chamäleona do úst; zasuňte iba špachtľu!

2

Kontrola LED svetla

Pred testom sa uistite, že je LED zdroj svetla nastavený na maximálny jas!

3

Spustenie videa

Spustite nahrávanie videa!

4

Vyšetrenie hrdla

Držte Chameleóna za telo, vložte špachtľu do otvorených úst dieťaťa a jemne ňou zatlačte jazyk nadol. Staršie deti môžete požiadať, aby postupne vyslovili hlásky „e“, „a“ a „á“! Takto sú hrdlo a hltan najlepšie viditeľné, takže uvidíte všetky ich časti aj pohyb orgánov.

5

Zastavenie nahrávania

Ak máte pocit, že je vyšetrenie ukončené a kamera „zachytila“ všetko, zastavte nahrávanie videa!

Aj po domácom teste musíte zariadenie dezinfikovať a špachtlu vyhodiť. Na každý test použite novú špachtľu!

Bezpečnostné pokyny

1. Nenechajte kameru Chameleón spadnúť, ani ju nenarážajte s ňou do tvrdých predmetov!
2. Nepokúšajte sa kameru rozoberať ani opravovať!
3. Nepoužívajte ani neskladujte kameru v prašnom prostredí alebo na pláži, aby sa do objektívu nedostal prach či piesok, ktorý by ho mohol poškodiť!
4. Nepoužívajte ani neskladujte kameru v horúcom prostredí ani na priamom slnku!
5. Nepoužívajte ani neskladujte kameru v blízkosti silných magnetických polí, napríklad magnetov alebo transformátorov!
6. Nedotýkajte sa objektívu kamery!
7. Nenechávajte objektív dlhodobo vystavený priamemu slnečnému žiareniu!
8. Aby vlhkosť nepoškodila kameru Chameleón, nepoužívajte ani neskladujte ju vo veľmi vlhkom prostredí, napríklad v daždi alebo pri vodných plochách. Ak sa do kamery náhodou dostane voda, ihneď ju vypnite!
9. Ak preniesete kameru Chameleón z chladného prostredia do teplejšieho, môže sa vytvoriť kondenzácia. Pred zapnutím kamery chvíľu počkajte!
10. Pri čistení tela kamery Chameleón nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, prípravky na báze alkoholu ani organické čističe či rozpúšťadlá! Na utretie a vyčistenie objektívu použite profesionálnu handričku na čistenie optiky a vhodný čistiaci roztok!
11. Ak kameru neplánujete dlhší čas používať, uschovajte ju na suchom a čistom mieste!

Záruka a výroba



01 Záruka

2-ročná záruka v súlade so zákonnými požiadavkami pri používaní výrobku podľa určenia.

Vyrobené v EÚ

Zákaznícky servis 02

<https://www.chameleonkamera.sk/>



03 Výrobca a distribútor

Distribútor: KARDIOS s.r.o. Železničná 50, Bratislava, info@kardios.sk

Výrobca: Kaméleon kamera Kft.
8312 Balatonederics, József Attila utca 62.





www.chameleonkamera.sk

